

Coleta e Transporte de Amostras Sarampo e Rubéola

virologia@saude.rs.gov.br

AGRAVO	MATERIAL	FASE DE COLETA	ACONDICIONAMENTO	TEMPO DE ENVIO	TRANSPORTE	RESULTADO
<p>RUBÉOLA Pedir no GAL: Rubéola- Sorologia Faz o diferencial automaticamente</p>	<p>Sangue – 5 a 10ml sangue, centrifugado sem anticoagulante Soro – 2 mL</p>	<p>Do 1º dia do exantema até 30 dias após.</p>	<p>Tubo Eppendorf de 2 mL ou Tubo de ensaio com tampa ou Tubos com gel separador Manter de 4°C a 8°C</p>	<p>Enviar até 5 dias</p>	<p>Caixa térmica com gelo reciclável.</p>	<p>Resultado - 4 dias Disponível no Sistema GAL</p>
<p>SARAMPO Pedir no GAL: Sarampo-Sorologia Faz o diferencial automaticamente</p>	<p>Sangue – 5 a 10ml sangue, centrifugado sem anticoagulante Soro – 2 mL</p>	<p>Do 1º dia do exantema até 30 dias após.</p>	<p>Tubo Eppendorf de 2 mL ou Tubo de ensaio com tampa ou Tubos com gel separador Manter de 4°C a 8°C</p>	<p>Enviar até 5 dias</p>	<p>Caixa térmica com gelo reciclável.</p>	<p>Resultado - 4 dias Disponível no Sistema GAL</p>
<p>PARVOVÍRUS (surto) Diferencial para Doenças Exantemáticas</p>	<p>Sangue – 5 a 10ml sangue, centrifugado sem anticoagulante Soro – 2 mL</p>	<p>Do 1º dia do exantema até 30 dias após.</p>	<p>Tubo Eppendorf de 2 mL ou Tubo de ensaio com tampa ou Tubos com gel separador Manter de 4°C a 8°C</p>	<p>Enviar até 5 dias</p>	<p>Caixa térmica com gelo reciclável.</p>	<p>Resultado - 4 dias Disponível no Sistema GAL</p>
<p>SARAMPO OU RUBÉOLA DETECÇÃO VIRAL - RT-PCR Pedir no GAL: Sarampo-Biologia Molecular Rubéola- Biologia Molecular</p>	<p>- Swab naso + orofaringe OU Aspirado de Secreção Nasofaringe - Urina - jato médio da 1ª urina da manhã</p>	<p>Coleta ideal até 5 dias a partir do 1º dia do exantema, até 30 dias.</p>	<p>1-Kit de Coleta(3 swabs de rayon com solução salina) do LACEN (solicitar para Virologia) 2- Pote de plástico estéril, rígido, tampa de rosca bem fechado Manter tudo de 4°C a 8°C</p>	<p>Enviar o mais rápido possível, no mesmo dia até às 17:00h.</p>	<p>Caixa térmica com gelo reciclável.</p>	<p>Disponível no Sistema GAL Sem previsão. Enviado para a FIOCRUZ-RJ.</p>