

NORMAS PARA COLETA, TRANSPORTE E ENVIO DE AMOSTRAS PARA HEPATITE "C" CARGA VIRAL 2025

- O Requisitante (município ou serviço) cadastra no GAL.
- **A coleta e o transporte é responsabilidade do requisitante devendo observar os prazos de chegada das amostras no Laboratório.**
- Imprime a requisição e encaminha as amostras até o LACEN-CEVS juntamente com o **Formulário de solicitação** (página AIDS) assinada e carimbada pelo médico do SUS
- O LACEN realiza os exames e cadastra o resultado de CV no GAL
- O requisitante habilitado no GAL imprime o resultado e entrega ao paciente.

É obrigatório utilizar o GAL para encaminhar exames e receber os resultados pela Rede de Biologia Molecular para HEPATITES C e B implantada pelo Departamento de IST/AIDS e HV/MS.

1 - SOBRE PREENCHIMENTO DA REQUISIÇÃO DO GAL

Enviar as amostras ao LACEN-CEVS acompanhadas da ficha de cadastro no GAL contendo nos dados clínicos, laboratoriais, o motivo da realização do exame (o GAL exige), e mais a Formulário de solicitação (preenchido pelo médico solicitante (SUS) com CID, assinatura e carimbo do médico. Formulários disponíveis na página da AIDS.

- Quando paciente estiver em tratamento com as medicações específicas, o médico deverá solicitar só a Carga Viral de HCV.

Dados obrigatórios que devem ser preenchidos no pedido do GAL:

- Número da notificação no SINAN - o campo do SINAN deve ser preenchido completamente sob pena do Sistema não aceitar o cadastro do paciente (não deixa salvar)

- **Número do cartão SUS do paciente**

- Endereço completo do paciente com o CEP
- Data de nascimento do paciente
- CPF do paciente

Nome do exame no GAL:

Pesquisa	Exame	Metodologia
Hepatite C- Carga Viral- em tempo real	pesquisa quantitativa do RNA do vírus da hepatite C(VHC)	RT-PCR

Atenção: Não esquecer de "Encaminhar para rede" no GAL, quando necessário corrigir a data da coleta na requisição do GAL antes de enviar as amostras ao Laboratório.

Prazo de resultados de Carga Viral é de 7 dias.

2 - COLETA DE SANGUE COM EDTA :

- Essa coleta não exige preparação prévia do paciente, mas recomenda-se o jejum de 8h.
- Para cada paciente deverão ser coletados **2** tubos de 5mL ou 4mL cada com anticoagulante **EDTA** (tampa roxa); **Deve-se colher até a marca do tubo.**
- Imediatamente após a coleta, os tubos devem ser homogeneizados por inversão, em um mínimo de 5 vezes, para impedir a coagulação.
- Os tubos deverão ser identificadas, antes de coletar, com: nome completo legível e **igual ao do GAL**, tipo de exame (HCV-CV), município de origem, data e hora da coleta, natureza da amostra (**sangue com EDTA**).
- Após a coleta, o sangue total deve permanecer a temperatura de geladeira (2 a 8°C), até o envio.

O plasma será separado no LACEN-RS, pois requer material livre de enzimas RNAses e DNAses.

NÃO CONGELAR AS AMOSTRAS

3 - TRANSPORTE DAS AMOSTRAS:

- As amostras devem ser colocadas em isopor **com** gelo reciclável e chegar ao LACEN-CEVS no máximo em até 18h após coleta.

Horário para recebimento das amostras no LACEN-CEVS: segunda a quinta-feira das 07:00h até 17:00h e nas sextas-feiras das 07:00h até 12:00h.

Amostras enviadas fora das normas acima estabelecidas não serão processadas.

OBS:

**Genotipagem HCV - NOTA TÉCNICA Nº 302023-CGAHV.DVIAHVSVSAMS -
Geno HCV atualizações 3-11 anos.**

Quando o houver pedido de genotipagem de HCV somente para os casos de crianças (entre 3 e 11 anos) e pesando menos de 30 kg, antes de coletar o solicitante deve enviar um email tratamento.hepatites@aids.gov.br e esperar as orientações do MS. Se for liberada a coleta o LACEN receberá as instruções.